

SOPELEK

aspirator do nosa



Instrukcja używania


Zastosowanie:

Sopelek to aspirator kataru stosowany u dzieci od pierwszych dni życia podczas infekcji objawiającej się katarciem.

Zestawienie elementów aspiratora do nosa

Sopelek

- A - Końcówka aspiratora z jednorazowym, miękkim filtrem
- B - Cylinder główny aspiratora
- C - Ustnik z wężykiem umożliwiającym odciąganie wydzieliny z nosa
 - 3 końcówki

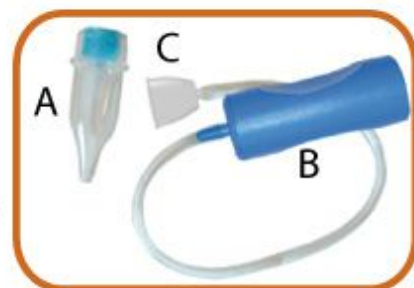

Wskazania:

Sopelek aspirator do nosa służy do usunięcia wydzieliny z jamy nosowej u dzieci. Nie wolno stosować do innych celów!

Przeciwwskazania:

Nie stosować aspiratora w przypadku uszkodzeń błony śluzowej nosa, krwawienia lub hemofilii.



Ostrzeżenia:

1. Wyrób zawiera drobne elementy. Ryzyko zadławienia. Przechowywać w opakowaniu bez dostępu małych dzieci.
2. Proces odciągania wydzieliny z nosa dziecka może zostać przeprowadzony tylko przez osobę dorosłą.
3. W przypadkach stosowania urządzenia u chorych ze stwierdzoną chorobą zakaźną końcówkę A należy traktować jako jednorazową pomimo stosowania procedur mycia jak w instrukcji.
4. Końcówki są wyposażeniem osobistym dedykowanym dla jednej osoby.
5. Aspirator przechowuj w suchym, czystym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Pozostałe informacje:

Jeżeli błona śluzowa noska jest wysuszona lub widoczna jest duża ilość gęstej wydzieliny zaaplikuj uprzednio do każdego otworu nosowego 3-4 krople soli fizjologicznej lub specjalnego donosowego roztworu soli morskiej.

Każdy poważny incydent medyczny związany ze Sopelek aspirator do nosa musi być zgłoszony do Salus International Sp. z o. o. i do właściwego organu kraju, w którym przebywa użytkownik.

Na podstawie oceny klinicznej i analizy ryzyka stwierdzono, że korzyści z używania urządzenia są wysokie przy niskim poziomie ryzyka.

Producent zapewnia właściwe ostrzeżenia i oznakowania, które ograniczają możliwe ryzyko.

Sopelek aspirator do nosa przeznaczony jest tylko do użytku domowego. W razie schorzeń nosa, skontaktuj się z lekarzem.

SOPELEK

aspirator do nosa



Metoda może służyć zarówno do codziennej higieny noska, jak i do usuwania zalegającej wydzieliny. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdzić czy poszczególne elementy nie są uszkodzone, następnie każdy element należy wymyć w ciepłej wodzie.

1. Nałóż końcówkę A z jednorazowym filtrem na cylinder główny B aspiratora.
2. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji, umieść ustnik C w swoich ustach, a końcówkę A z jednorazowym filtrem w otworze nosowym dziecka. Osoba wykonująca odciąganie nie może jednocześnie wykonywać innych czynności np. jedzenie, picie, rozmowa.
3. Delikatnie, progresywnie, jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik C najpierw w jednym, a następnie drugim otworze nosowym.
4. Wyjmij zanieczyszczoną końcówkę A z jednorazowym filtrem, filtr wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w gorącej wodzie [ok 90 stopni] przez max 15 sekund. Wysusz wszystkie elementy i ułóż ponownie w pudełku.

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie wszystkich symboli stosowanych na etykiecie wyrobu i w instrukcji:



Wyrób medyczny



Zajrzyj do instrukcji używania



Producent



Ostrzeżenia



Oznaczenie CE wskazuje, że wyrób jest zgodny z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.



Chronić przed wilgocią



Numer serii produkcyjnej



Nie używać, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone



Użyć do daty



Wolny od BPA

Aspirator do nosa Sopelek jest oryginalnym polskim wyrobem medycznym.

Akcesoria możliwe do oddzielnego kupienia:

- Sopelek zapas końcówki x 4 szt. (z filtrami jednorazowymi)
- Sopelek zapas jednorazowe filtry x 10 szt.