

SOPELEK 2

aspirator do nosa



Instrukcja używania


Zastosowanie:

Sopelek 2 to aspirator kataru stosowany u dzieci od pierwszych dni życia podczas infekcji objawiającej się katarciem.

Zestawienie elementów aspiratora do nosa

Sopelek 2

- A - Końcówka aspiratora z jednorazowym, miękkim filtrem
- B - Cylinder główny aspiratora
- C - Ustnik z wężykiem umożliwiającym odciąganie wydzieliny z nosa
 - 10 jednorazowych filtrów

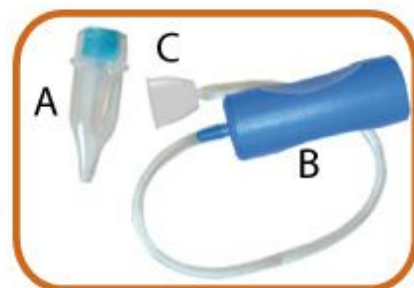

Wskazania:

Sopelek 2 aspirator do nosa służy do usunięcia wydzieliny z jamy nosowej u dzieci. Nie wolno stosować do innych celów!

Przeciwwskazania:

Nie stosować aspiratora w przypadku uszkodzeń błony śluzowej nosa, krwawienia lub hemofilii.



Ostrzeżenia:

1. Wyrób zawiera drobne elementy. Ryzyko zadławienia. Przechowywać w opakowaniu bez dostępu małych dzieci.
2. Proces odciągania wydzieliny z nosa dziecka może zostać przeprowadzony tylko przez osobę dorosłą.
3. W przypadkach stosowania urządzenia u chorych ze stwierdzoną chorobą zakaźną końcówkę A należy traktować jako jednorazową pomimo stosowania procedur mycia jak w instrukcji.
4. Końcówki są wyposażeniem osobistym dedykowanym dla jednej osoby.
5. Aspirator przechowuj w suchym, czystym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Pozostałe informacje:

Jeżeli błona śluzowa noska jest wysuszona lub widoczna jest duża ilość gęstej wydzieliny zaaplikuj uprzednio do każdego otworu nosowego 3-4 krople soli fizjologicznej lub specjalnego donosowego roztworu soli morskiej.

Każdy poważny incydent medyczny związany ze Sopelek 2 aspirator do nosa musi być zgłoszony do Salus International Sp. z o. o. i do właściwego organu kraju, w którym przebywa użytkownik.

Na podstawie oceny klinicznej i analizy ryzyka stwierdzono, że korzyści z używania urządzenia są wysokie przy niskim poziomie ryzyka.

Producent zapewnia właściwe ostrzeżenia i oznakowania, które ograniczają możliwe ryzyko.

Sopelek 2 aspirator do nosa przeznaczony jest tylko do użytku domowego. W razie schorzeń nosa, skontaktuj się z lekarzem.

SOPELEK 2

aspirator do nosa



Metoda może służyć zarówno do codziennej higieny noska, jak i do usuwania zalegającej wydzieliny. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdzić czy poszczególne elementy nie są uszkodzone, następnie każdy element należy wymyć w ciepłej wodzie.

1. Nałóż końcówkę A z jednorazowym filtrem na cylinder główny B aspiratora.
2. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji, umieść ustnik C w swoich ustach, a końcówkę A z jednorazowym filtrem w otworze nosowym dziecka. Osoba wykonująca odciąganie nie może jednocześnie wykonywać innych czynności np. jedzenie, picie, rozmowa.
3. Delikatnie, progresywnie, jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik C najpierw w jednym, a następnie drugim otworze nosowym.
4. Wyjmij zanieczyszczoną końcówkę A z jednorazowym filtrem, filtr wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w gorącej wodzie [ok 90 stopni] przez max 15 sekund. Wysusz wszystkie elementy i ułóż ponownie w pudełku.

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie wszystkich symboli stosowanych na etykiecie wyrobu i w instrukcji:



Wyrób medyczny



Zajrzyj do instrukcji używania



Producent



Ostrzeżenia



Oznaczenie CE wskazuje, że wyrób jest zgodny z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.



Chronić przed wilgocią



Numer serii produkcyjnej



Nie używać, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone



Użyć do daty



Wolny od BPA

Aspirator do nosa Sopelek 2 jest oryginalnym polskim wyrobem medycznym.

Akcesoria możliwe do oddzielnego kupienia:

- Sopelek zapas końcówki x 4 szt. (z filtrami jednorazowymi)
- Sopelek zapas jednorazowe filtry x 10 szt.